


“康健”一般手術用手動式器械（未滅菌）

“AMD” Manual surgical instrument for general use (Non-Sterile)

衛部醫器製壹字第 005365 號

：使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

■ 產品規格：

磁性器械墊 NRM-XXXXXXX

■ 產品敘述：

磁性器械墊使用於手術中作為傳遞手術刀或尖銳器械之用途，其表面具有磁性且止滑效果。使用前須滅菌。

■ 使用步驟：

- 1) 磁性器械墊須依據醫院所規範之滅菌程序於使用前滅菌。
- 2) 由流動護士將滅菌後之磁性器械墊交給刷手護士。
- 3) 刷手護士將手術刀或尖銳器械置於磁性器械墊，然後交給外科醫生使用。
- 4) 使用後，依據醫院所規範之清潔程序將磁性器械墊清潔乾淨。

■ 注意事項:

- 在使用前和/或進入無菌區域之前，磁性器械墊必須先被滅菌。
- 產品為重複使用且必須遵照醫院所規範之清潔和滅菌程序。
- 使用後丟棄須依據醫院、行政單位和/或當地主管機關所規範之程序。
- 搬運時應避免遭受撞擊，使用前若發現包裝已經破損、汙染，請勿使用。



醫療器材商/製造業者名稱：康健生醫科技股份有限公司
醫療器材商/製造業者地址：新北市五股區五權五路 29 號 4、5 樓