

“康健” 導入/引流導管及其附件（滅菌）

“AMD” Introduction/Drainage Catheter and Accessories (Sterile)

衛部醫器製壹字第 0005359 號

⚠：使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

■ 產品敘述：

其產品為配合腹腔鏡手術所設計，作為注入生理食鹽水等沖洗液體進入腹腔，進行沖洗組織器官與抽吸手術所產生的廢液與體液等，並將其引流至體外廢液收集瓶中，以利腹腔鏡手術之運作。

■ 型號及規格：

ASI-XXXXX。

■ 使用步驟：

- 1) 確認滅菌包裝袋是否破損與產品效期是否過期。
- 2) 由流動護士將滅菌包裝袋打開並由刷手護士取出引流抽吸接管部分。
- 3) 將其引流針管插入食鹽水袋中，並將管夾打開以確認食鹽水流入管內。
- 4) 將另一端抽吸出口端接至體外引流收集瓶入口端，打開體外引流氣體開關。

■ 注意事項：

本產品的設計，試驗和生產僅為單個患者使用。重新使用或該產品的二次處理可能導致它的功能喪失及造成後續患者被感染之疑慮。

搬運時應避免遭受撞擊，使用前若發現包裝已經破損、汙染，請勿使用。



醫療器材商/製造業者名稱：康健生醫科技股份有限公司

醫療器材商/製造業者地址：新北市五股區五權五路 29 號 4、5 樓

版次：導入/引流導管及其附件（滅菌）2022.01 Ver. D

Part No. MSI-C001-B-99999