

“康健”取物袋 “AMD” Lap Bag

衛部醫器製字第 004986 號



：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

■ 產品敘述及用途

本產品用於一般外科腹腔鏡手術或婦產科內視鏡手術之中，其目的是將欲切除的組織部位於手術過程中暫時放入此一袋中，以避免因手術切除過程中將切除之組織忘記取出或將非正常的組織遺漏於病人腹部之中，待手術完成時將放入的組織與內視鏡取物袋一併取出，以利手術之運作和節省手術之中找尋與再確認等時間。

■ 型號及規格：

型號	規格
ALB-YN30	尼龍布取物袋（容量約 290 ml）
ALB-YN50	尼龍布取物袋（容量約 650 ml）
ALB-YN70	尼龍布取物袋（容量約 1800 ml）
ALB-LN30	尼龍布取物袋（容量約 290 ml）+延長線
ALB-LN50	尼龍布取物袋（容量約 650 ml）+延長線
ALB-LN70	尼龍布取物袋（容量約 1800 ml）+延長線
ALB-AV30	自動撐開取物袋（容量約 170 ml）（V 形袋體）（拉環）
ALB-AV50	自動撐開取物袋（容量約 260 ml）（V 形袋體）（拉環）
ALB-CUD0	自動撐開取物袋（容量約 150 ml）（U 形袋體）（拉環）
ALB-CUE0	自動撐開取物袋（容量約 300 ml）（U 形袋體）（拉環）
ALB-CUF0	自動撐開取物袋（容量約 800 ml）（U 形袋體）（拉環）
ALB-CUG0	自動撐開取物袋（容量約 1250 ml）（U 形袋體）（拉環）
ALB-GC30	導引款取物袋（容量約 175 ml）（藍色方形尾蓋）
ALB-GC50	導引款取物袋（容量約 650 ml）（藍色橢圓形尾蓋）
ALB-GV30	導引款取物袋（容量約 150 ml）（藍色方形尾蓋）（拉線）（拉環）
ALB-GV50	導引款取物袋（容量約 650 ml）（藍色橢圓形尾蓋）（拉線）（拉環）

■ 使用步驟：

1. 確認無菌包裝袋是否破損與有效期限是否過期。
2. 由流動護士將無菌包裝袋打開並由刷手護士取出袋內之取物袋。
3. 將取物袋經由腹腔鏡手術之切口置入腹腔中，(a) 尼龍布取物袋：將其捲曲並經由腹腔鏡手術之切口放置於腹中，其後利用腹腔鏡之手術夾鉗於腹腔中將取物袋展開；(b) 自動款取物袋：將導引管經由腹腔鏡手術之切口穿置於腹中，推動後端手柄使取物袋於腹中展開；(c) 導引款取物袋：將導引管經由腹腔鏡手術之切口穿置於腹中，若為拉環款式則必須於穿入前將拉環鬆開並留置於腹腔外，利用腹腔鏡之手術夾鉗於腹腔中將取物袋夾出展開後即可將導引管移除。
4. 將欲取出之組織放入取物袋中一併取出，(a) 尼龍布取物袋：利用腹腔鏡之手術夾鉗於腹腔中將取物袋縮口，經由腹腔鏡手術之切口將袋體於腹腔中移出；(b) 自動款取物袋：往後拉出後端手柄使金屬彈片脫離袋體後再將導引管移除，拉動拉環使袋口縮緊後再經由腹腔鏡手術之切口將袋體於腹腔中移出；(c) 導引款取物袋：不含拉環款為利用腹腔鏡之手術夾鉗於腹腔中將取物袋縮口，含拉環款為拉動拉環使袋體縮口後皆經由腹腔鏡手術之切口將袋體於腹腔中移出。

■ 注意事項

1. 本產品為一次性耗材產品，限單一次使用，請勿重複滅菌使用。
2. 使用前請詳閱外包裝上之使用說明，如有破損、密封不良或超過滅菌保存期限則請勿使用。

3. 不可在袋體內使用切碎機切碎細胞，避免袋體因此破損。
4. 裝載細胞之取物袋不可經由穿刺器強制移出體外，避免袋體因此破損。



醫療器材商/製造業者名稱：康健生醫科技股份有限公司
醫療器材商/製造業者地址：新北市五股區五權五路 29 號 4、5 樓

版次：取物袋 2022.01 Ver. D

Part no. MLB-C001-A-99999