

“康健” 穿刺器

“AMD” ENDO-PORT Trocar with Cannula

衛部醫器製字第 005149 號

⚠️ : 使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

■ 產品敘述及用途

本產品係針對腹腔鏡，內視鏡手術所設計，可依手術部位與手術方式不同來採用不同的產品規格，一般標準使用為先將腹部肚臍部位以導引針注入二氧化碳氣體後，先使用不同穿刺器（5MM 或 10MM 或 12MM 或不同長度規格）將穿刺器部份與導引管部份組合，以手握穿刺器向下施力，此時穿刺器刀尖會利用刀鋒將皮下組織切割穿破組織，醫師會將穿刺器取出並留下導引管部分於腹部上，將腹腔鏡經由導引管進入腹腔內，因此醫師可經由腹腔影像傳送至電視螢幕上並判斷腹腔內各器官情況。此時醫師也會將二氧化碳氣體經由導引管上的沖器入口做最快速充氣，已形成腹內手術空間並於充氣結束後關閉充氣閥開關。醫師也會判斷是否繼續使用其他規格的安全穿刺器與決定其手術器械所需使用安全穿刺器的數量。

■ 型號及規格

系列別	型號	規格結構部件	材質	規格 (支)		
AST-KB80HX	AST-KB80H0	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*80 mm 軟套管帶魯爾接頭；滅菌	PC	1	6	60
AST-KBXXXX	AST-KB80N0	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*80 mm 硬套管帶魯爾接頭；滅菌	PC	1	6	60
	AST-KB10N0	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*100 mm 硬套管帶魯爾接頭；滅菌	PC	1	6	60
AST-PBXXXX	AST-PB80P0	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*80 mm 漏斗形硬套管帶 STOPCOCK 接頭；滅菌	PC	1	6	60
	AST-PB10P0	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*100 mm 漏斗形硬套管帶 STOPCOCK 接頭；滅菌	PC	1	6	60
AST-LXXXXX	AST-LD70A0	塑膠尖頭穿刺器 10 mm*75 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-LD10A0	塑膠尖頭穿刺器 10 mm*100 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-LE70A0	塑膠尖頭穿刺器 12 mm*75 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-LE10A0	塑膠尖頭穿刺器 12 mm*100 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
AST-TXXXXX	AST-TD07A0	帶刀穿刺器 (保護盾頭) 10 mm*75 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS, SUS	1	6	60
	AST-TD10A0	帶刀穿刺器 (保護盾頭) 10 mm*100 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS, SUS	1	6	60
	AST-TE07A0	帶刀穿刺器 (保護盾頭) 12 mm*75 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS, SUS	1	6	60
	AST-TE10A0	帶刀穿刺器 (保護盾頭) 12 mm*100 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS, SUS	1	6	60
AST-VBXXXX	AST-VB80K0	自動帶刀穿刺器 5 mm*80 mm 圓頭型套管帶旋轉鈕接頭；滅菌	PC, Silicone, PE, SUS	1	6	60
	AST-VB10K0	自動帶刀穿刺器 5 mm*100 mm 圓頭型套管帶旋轉鈕接頭；滅菌	PC, Silicone, PE, SUS	1	6	60
AST-MXXXXX	AST-MD70A0	塑膠尖頭強化款穿刺器 10 mm*70 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-MD10A0	塑膠尖頭強化款穿刺器 10 mm*100 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-ME70A0	塑膠尖頭強化款穿刺器 12 mm*70mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-ME10A0	塑膠尖頭強化款穿刺器 12 mm*100 mm+套管；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60

組合包規格

系列別	型號	規格結構部件	材質	規格 (支)		
AST-KB80HX	AST-KB80HT	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*80 mm 軟套管*2 帶魯爾接頭；滅菌	PC	1	6	60
AST-KBXXXX	AST-KB80NT	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*80 mm 硬套管*2 帶魯爾接頭；滅菌	PC	1	6	60
	AST-KB10NT	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*100 mm 硬套管*2 帶魯爾接頭；滅菌	PC	1	6	60
AST-PBXXXX	AST-PB80PT	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*80 mm 漏斗形硬套管*2 帶 STOPCOCK 接頭；滅菌	PC	1	6	60
	AST-PB10PT	塑膠尖頭穿刺器 5 mm*100 mm 漏斗形硬套管*2 帶 STOPCOCK 接頭；滅菌	PC	1	6	60
AST-LXXXXX	AST-LD70AT	塑膠尖頭穿刺器 10 mm*75 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-LD10AT	塑膠尖頭穿刺器 10 mm*100 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-LE70AT	塑膠尖頭穿刺器 12 mm*75 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-LE10AT	塑膠尖頭穿刺器 12 mm*100 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
AST-TXXXXX	AST-TD07AT	帶刀穿刺器 (保護盾頭) 10 mm*75 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS, SUS	1	6	60
	AST-TD10AT	帶刀穿刺器 (保護盾頭) 10 mm*100 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS, SUS	1	6	60
	AST-TE07AT	帶刀穿刺器 (保護盾頭) 12 mm*75 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS, SUS	1	6	60
	AST-TE10AT	帶刀穿刺器 (保護盾頭) 12 mm*100 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS, SUS	1	6	60
AST-VBXXXX	AST-VB80KT	自動帶刀穿刺器 5 mm*80 mm 圓頭型硬管*2 帶旋轉鈕接頭；滅菌	PC, Silicone, PE, SUS	1	6	60
	AST-VB10KT	自動帶刀穿刺器 5 mm*100 mm 圓頭型套管*2 帶旋轉鈕接頭；滅菌	PC, Silicone, PE, SUS	1	6	60
AST-MXXXXX	AST-MD70AT	塑膠尖頭強化款穿刺器 10 mm*70 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-MD10AT	塑膠尖頭強化款穿刺器 10 mm*70 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-ME70AT	塑膠尖頭強化款穿刺器 12 mm*70 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60
	AST-ME10AT	塑膠尖頭強化款穿刺器 12 mm*70 mm+套管*2；滅菌	PC, Silicone, PE, ABS	1	6	60

■ 使用步驟

1. 確認滅菌包裝袋是否破損與滅菌日期是否過期。
2. 由流動護士將滅菌包裝袋打開，並將穿刺器與導引管組合從滅菌袋滑到無菌區。
3. 將其穿刺器與導引管組合並確認安全開關置於 on 位置。
4. 進入腹腔內後，可取出穿刺器並留置導引管於腹部上。

■ 注意事項

1. 此安全穿刺器為一次性耗材產品，請勿重複使用。
2. 使用前請詳閱外包裝上之使用說明，如有破損、密封不良，或超過滅菌保存期限則請勿使用。
3. 使用後請依照醫院廢棄物管理辦法後續處理。



醫療器材商/製造業者名稱：康健生醫科技股份有限公司
醫療器材商/製造業者地址：新北市五股區五權五路 29 號 4、5 樓