

# “康健”防霧油

## “AMD” Anti-Fog Solution

衛部醫器製字第 006310 號

使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

### 產品敘述:

為無菌包裝的一次性腹腔鏡使用產品，在進行內視鏡或腹腔鏡時或之前使用。可防止內視鏡/腹腔鏡手術器械鏡頭、護目鏡或其他類似儀器起霧影響視線。

### 使用步驟:

- A.1) 確認無菌包裝，若包裝受損請勿使用，改取一新的完整包裝。
- A.2) 將防霧油瓶子及泡棉置於無菌區域。
- A.3) 打開防霧油蓋子並將防霧油滴在 PU 泡棉(若使用醫用泡棉套組，則先需拆開鋁箔包並鬆開細繩)上直至泡棉濕潤。
- A.4) 將鏡頭/其他類似儀器按壓在已沾有防霧油的泡棉上。按壓完成後鏡頭/其他類似儀器已準備完成可使用。
- A.5) 若使用醫用泡棉需額外繼續下列步驟:
  - A.5.1) 需使用  $\geq 10$  mm 的穿刺器，使用腹腔器械末端夾取醫用泡棉，經由穿刺器將醫用泡棉送入腹腔。鬆開的細繩需外露於體外。
  - A.5.2) 如果鏡頭有起霧現象或在手術過程中有被異物沾黏，以醫用泡棉擦拭鏡頭。
  - A.5.3) 手術後，以留在體外的細繩將醫用泡棉拉出。
  - A.5.4) 若僅使用  $< 10$  mm 的穿刺器，醫用泡棉僅限體外使用。
- A.6) 當使用 PU 泡棉套組或使用  $< 10$  mm 的穿刺器+醫用泡棉套組時，當鏡頭有起霧現象或在手術過程中有被異物沾黏，可自體內取出並以泡棉擦拭。
- A.7) 在腹腔鏡/內視鏡結束後，根據法規規定丟棄防霧油。

### 產品型號:

| 型號        | 內容物         |
|-----------|-------------|
| AAF-IBB10 | 防霧油 + PU 泡棉 |
| AAF-IBP10 | 防霧油 + 醫用泡棉  |
| AAF-IB010 | 防霧油         |
| AVA-111Z  | 醫用泡棉        |

### 注意事項:

本產品的設計，試驗和生產僅為單個患者使用。重新使用或該產品的二次處理可能導致它的功能喪失及造成後續患者被感染之疑慮。重新加工或再滅菌可能會增加汙染和病人感染的風險，因此請勿重複使用、重新加工或重新滅菌。在被打開或受損前，內容物為無菌狀態。

如有需求更多資訊,請連繫:



醫療器材商/製造業者名稱: 康健生醫科技股份有限公司

醫療器材商/製造業者地址: 新北市五股區五權五路29號4、5樓