

“康健” 單極組織夾鉗

“AMD” Monopolar Grasping Forceps

衛部醫器製字第 005118 號

⚠：使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

產品敘述

本產品是針對醫師於腹腔鏡手術時使用，組織夾鉗已滅菌處理，使用時需搭配電外科單極凝固切割產生器，本產品無使用乳膠材質。


禁忌症

與內視鏡及一般手術的禁忌症相同；組織夾鉗不能用於避孕目的輸卵管栓塞，但可用於輸卵管切割後的止血。

型號與規格

產品型號	結構部件	材質	尺寸	規格
ALG-10B15GC0	彎分離鉗，TC 型把手	SUS304, ABS	5*330 mm	Premier TC 手把及 4 mm 黃金香蕉接頭
ALG-20B15G30	無齒釘鉗，TC 型把手	SUS304, ABS	5*330 mm	Premier TC 棘輪手把及 4 mm 黃金香蕉接頭
ALG-30B15GC0	無損傷抓鉗，TC 型把手	SUS304, ABS	5*330 mm	Premier TC 手把及 4 mm 黃金香蕉接頭
ALG-30B15G30	無損傷抓鉗，TC 型把手	SUS304, ABS	5*330 mm	Premier TC 手把加鎖卡及 4 mm 黃金香蕉接頭

產品示意圖

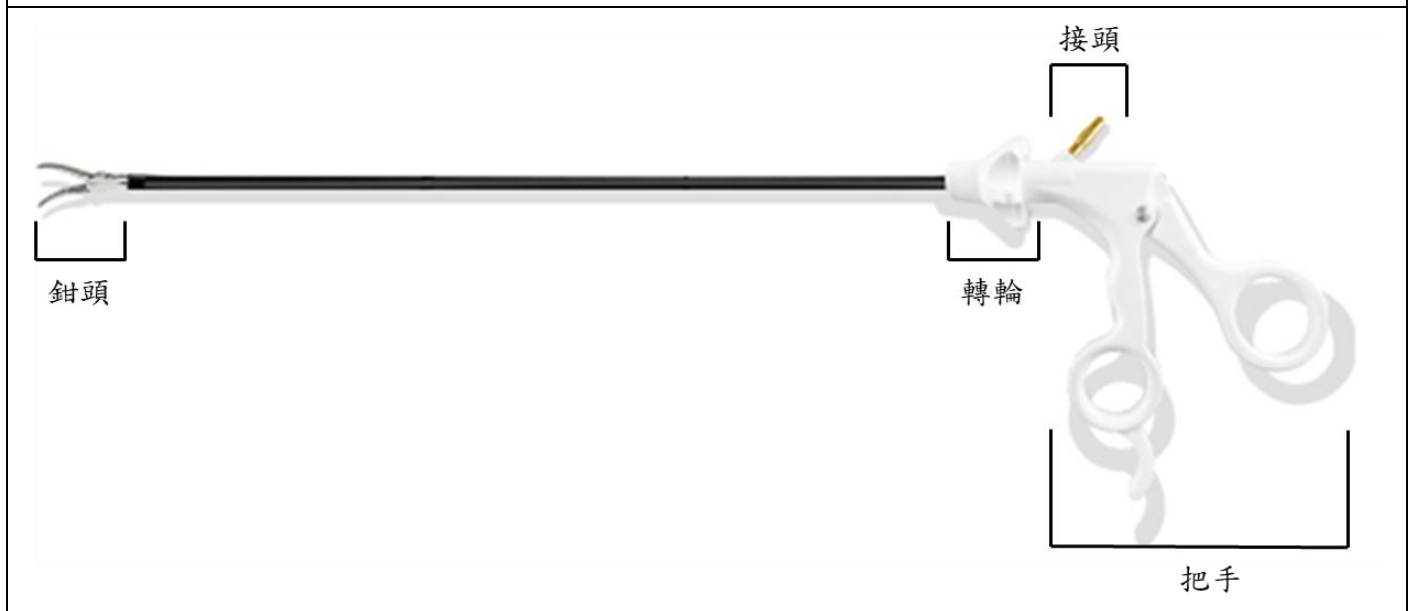

使用步驟

1. 本器械需經 5 mm 或以上穿刺器導引管進入與使用，注意從穿刺器導引管進入或退出夾鉗之前，需將開口閉合。
2. 可經由環型把手來控制打開或閉合夾鉗。
3. 可利用轉輪 360 度旋轉 5 mm 絕緣軸改變鉗頭方向，以利手術之進行。
4. 本器械配有標準 4 mm 黃金香蕉接頭，需使用電外科手術單極凝固切割器時，請遵照電外科手術單極凝固切割器製造商提供的使用操作，使用時電壓不可超過 700Vp-p。

■ 注意事項

1. 此器械已經滅菌處理，為一次性使用，如果包裝已經打開或破損，請勿使用或重複滅菌。使用後請丟棄。
2. 腹腔鏡操作只能由對這類操作的知識有充分的了解和接受過全面培訓的醫生來操作。另外在操作之前應參考參閱該操作之技術危險禁忌症和併發症有關的醫學文獻。
3. 若在同一操作中使用來自不同製造商的腹腔鏡和附件，請在操作之前要確認它們之間的相容性，並確保接地電路之絕緣。
4. 必須徹底了解和掌握電外科手術操作之原則和技術，以免病人或操作者有灼傷或電殛的危險。
5. 本器械應與經 U.L 認證過的電外科手術單極凝固切割器一起使用，並經腳控制器啟動。
6. 使用時電壓不可超過 700 V_{p-p}，並參考電外科手術單極凝固切割器製造商提供的使用操作手冊，以確保遵照所有安全手冊。
7. 在使用電外科手術器械時，若使用金屬穿刺器套管，會有潛在危險。



醫療器材商/製造業者名稱：康健生醫科技股份有限公司

醫療器材商/製造業者地址：新北市五股區五權五路 29 號 4、5 樓

版次：單極組織夾鉗 2022.01 Ver. D

Part No. MLG-C001-A-99999