

“康健” 氣腹針

“AMD” Veress Needle

衛部醫器製字第 004984 號

使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

■ 產品敘述及用途：

氣腹針為腹腔鏡手術所設計，作為注入二氧化碳氣體，以作為腹內空間以利腹腔鏡手術之運作，於充氣完後即可取出。

■ 編號及規格：

AVN-T120: 120mm 一般手術使用。

AVN-T150: 150mm 特殊身材手術使用。

■ 禁忌：

對腹腔鏡手術禁忌者，不適合使用本裝置。

■ 使用步驟：

1. 確認滅菌包裝袋是否破損與有效日期是否過期。
2. 由流動護士將滅菌包裝袋打開並由刷手護士取出。
3. 將其氣腹針由肚臍內垂直插入，注入少許食鹽水，以確認導引針確實進入腹內。
4. 注入氣體，待充氣至指定壓力後取出即可。

■ 警語：

此器材是被設計為單次單一患者使用。重複使用該器材或再處理可能導致它的功能失效。再處理該器材或重新滅菌可能產生污染及增加病人感染的風險。

■ 副作用：

本產品無副作用或不良反應之相關報告。

■ 注意事項：

1. 本產品為無菌包裝之一次性耗材產品，請勿重複使用，已開封後，無論使用與否，皆必須丟棄。
2. 使用前請詳閱外包裝上之使用說明，如有破損，密封不良，或超過滅菌保存期限則請勿使用。
3. 移除氣腹針後，必須檢視穿刺部位的止血情形，如果血流不止，應採取適當地措施以止血。
4. 小心使用氣腹針，避免傷及大血管或身體器官。確實遵照下列注意事項，可降低風險：
 - a. 確定患者姿勢，使器官遠離穿刺部位。
 - b. 謹慎注意重要的解剖標誌點。
 - c. 針尖勿刺向大血管或器官組織。
 - d. 勿過於用力。



醫療器材商/製造業者名稱：康健生醫科技股份有限公司

醫療器材商/製造業者地址：新北市五股區五權五路 29 號 4、5 樓