


“康健” 腹腔鏡灌入器（滅菌）

“AMD” Laparoscopic insufflator (Sterile)

衛部醫器製壹字第 005360 號

 使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

■ 產品敘述及用途

其產品為配合腹腔鏡電外科手術於腔內所產生之手術煙霧與高濃度細懸浮粒子等有害氣體，作為一次性排放手術煙霧與過濾氣體中之懸浮微小粒子，以改善手術影像品質與減少潛在內含有毒物質排出於氣體中，維護手術室的空氣品質並減少對醫生及護士之工作危害。

■ 編號及規格：

ASF-3000 油煙過濾器（Smoker filter with tubing set）：
螺紋接頭帶滑輪槽控制

■ 主要材料成分：

PC、ABS、PVC tubing、Glass fiber、活性碳膜、Non-woven fabric。


■ 使用步驟：

1. 確認消毒包裝袋是否破損與消毒日期是否過期。
2. 由流動護士將消毒包裝袋打開並由刷手護士取出油煙過濾器組。
3. 將 PVC tubing 管路之螺紋接頭連接於穿刺器之氣體通道位置並確認氣體通道閥置於關閉位置。
4. 排氣執行：確認滑輪槽至於鬆開位置。打開穿刺器氣體通道閥開關並適當控制排氣量與避免朝向醫護人員排氣。

■ 注意事項

- 本產品經環氧乙烷（Ethylene Oxide）滅菌，限單一病患單次使用，請勿重複滅菌。
- 搬運時應避免遭受撞擊，使用前如發現包裝已遭破損、污染，請勿使用。
- 本產品只限銷售給醫師於手術中使用。
- 本器材僅供經過充分培訓並熟悉技術的人員操作，進行此類手術前，應參閱與本產品相關之操作技術、警告、禁忌症、併發症等醫學文獻。
- 使用前請詳閱外包裝上之使用說明，如有破損、密封不良則請勿使用。
- 本產品不與人體接觸，僅做為排放氣體使用。

如有需求更多資訊，請聯繫：

 醫療器材商/製造業者名稱：康健生醫科技股份有限公司
醫療器材商/製造業者地址：新北市五股區五權五路29號4、5樓
TEL: 886-2-22902627 FAX: 886-2-22988501
Email: sales@amdintl.com.tw

